

Инструкция по применению медицинского изделия

Спрей назальный «КВИКС®» в исполнении ««КВИКС® Эвкалипт»»

КВИКС® Эвкалипт

Описание медицинского изделия «КВИКС® Эвкалипт».

«КВИКС® Эвкалипт» применяется для облегчения симптоматики при заложенности носа и околоносовых пазух и обладает дополнительным освежающим эффектом. Действие изделия не реализуется путем фармакологического, иммунологического, генетического или метаболического воздействия на организм человека, а только благодаря физическим свойствам изделия. Изделие имеет кратковременный контакт с полостью носа.

«КВИКС® Эвкалипт» – это природный гипертонический спрей, содержащий очищенную воду из Атлантического океана с добавлением небольшого количества очищенного эвкалиптового масла. Концентрация соли в медицинском изделии «КВИКС® Эвкалипт» выше, чем в слизистой оболочке носа (гипертонический солевой раствор), благодаря чему возникает осмотическое давление, благоприятно воздействующее на снятие отека.

Состав медицинского изделия

«КВИКС® Эвкалипт».

В пересчете на 100 мл «КВИКС® Эвкалипт» содержит воду Атлантического океана, эвкалиптового масла 0,015 мл и воду очищенную до 100 мл. Концентрация соли в «КВИКС® Эвкалипт» соответствует около 26 г NaCl на литр раствора или 2,6% (гипертонический раствор). Не содержит химических добавок и консервантов.

Форма выпуска.

«КВИКС® Эвкалипт» выпускается во флаконах из полиэтилена высокой плотности объемом 30 мл. Каждый флакон снабжен наконечником с распылителем и защитным колпачком, который защищает содержимое флакона при хранении и транспортировке. Конструкция упаковки (включая встроенную систему антибактериальной защиты) гарантирует отсутствие загрязнения содержимого флакона в течение всего периода использования.

Свойства медицинского изделия

«КВИКС® Эвкалипт».

Медицинское изделие «КВИКС® Эвкалипт»:

- Снимает отек и заложенность носа и носовых пазух, способствуя физическому удалению избытка жидкости из слизистой оболочки носа, таким образом уменьшая отек.
- Размягчает скопившуюся слизь и облегчает процесс сморкания.
- Дает ощущение чистого и «свободного» носа и носовых пазух, облегчая дыхание, благодаря освежающему эффекту эвкалиптового масла.

Показания к применению медицинского изделия «КВИКС® Эвкалипт».

- Облегчение отека носа и носовых пазух при простудах и гриппе
- Активная очистка носовых ходов
- Сильный освежающий эффект

«КВИКС® Эвкалипт» предназначен для детей, начиная с шести лет и взрослых.

Quixx® eucalypt

V-No.:				V147854/01		TW-No.:		229813		BC-No.:		22-3151		Approved for printing:				
Package:				N/A		Language:		Russian										
Size:				160 x 180 mm		Weight:		50 g/m²										
Printing colours:				1. Pantone 282		Braille transcrip.:		N/A										
Font size:				8,5 pt		Group:		N/A		RUT:		N/A			RD-Code:		N/A	
Add. Info:				N/A		Date:		15.09.2022		Weise								

Способ применения.

Дети с 6 до 12 лет:

1-2 орошения каждого носового хода 2-3 раза в день.

Взрослым и детям старше 12 лет:

1-3 орошения каждого носового хода 2-3 раза в день.

Перед использованием взбалтывать.

Снять колпачок. Подготовить спрей к применению, несколько раз нажав на манжету наконечника до достижения мелкого аэрозольного распыления (рис. 1). После этого спрей готов к использованию: вставьте наконечник в носовой ход и нажмите на манжету с обеих сторон наконечника (рис. 2). Повторите процедуру с другим носовым ходом. После каждого использования очистить наконечник и закрыть наконечник колпачком. Наконечник обеспечивает дозированный поток и равномерное распределение спрея.

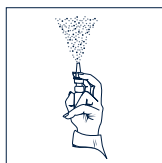


Рис. 1:



Рис. 2

В отношении длительности применения, обратиться к врачу или работнику аптеки. Не вызывает привыкания.

Противопоказания.

«КВИКС® Эвкалипт» не следует назначать детям младше 6 лет и пациентам с нарушениями состояния слизистой оболочки носа после проведенных операций. Пациентам с повышенной чувствительностью к морской воде или эвкалиптовому маслу применение не рекомендуется.

Использовать с осторожностью.

Проконсультируйтесь с врачом перед использованием «КВИКС® Эвкалипт» в период беременности и кормления грудью.

Взаимодействие с медицинскими изделиями и лекарственными препаратами.

До настоящего времени взаимодействие с другими медицинскими изделиями и лекарственными препаратами не выявлено.

Побочные эффекты.

Эвкалиптовое масло может вызвать аллергические реакции (в том числе одышку) у восприимчивых пациентов.

В начале применения может возникнуть небольшое жжение.

Условия хранения.

Хранить при комнатной температуре, в недоступном для детей месте.

Не использовать медицинское изделие после истечения срока годности, указанного на упаковке. После вскрытия упаковки, следует использовать в течение 6 месяцев.

Описание упаковки.

Флакон «КВИКС® Эвкалипт» содержит 30 мл раствора. В каждом флаконе содержится приблизительно 220 доз. Флакон снабжен системой антибактериальной защиты, которая предотвращает проникновение микробов на протяжении всего периода использования.

«КВИКС® Эвкалипт» является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2014/2266 от 23.05.2022

Производитель:

Лаборатуар Фармастер САС
П.З. де Краффт
67150 Эрстейн
Франция



Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей:

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини", Россия,
123112, г. Москва, Пресненская набережная, д.10,
БЦ «Башня на набережной», блок Б.
Тел.: (495) 785-01-00
Факс: (495) 785-01-01

Дата последней редакции 07/2021 г.

797/V147854/01
NOT23617V02

RU

Quixx® eucalypt



BERLIN-CHEMIE
MENARINI

V-No.:				V147854/01		TW-No.:		229813		BC-No.:		22-3151		Approved for printing:				
Package:				N/A		Language:		Russian										
Size:				160 x 180 mm		Weight:		50 g/m ²										
Printing colours:				1. Pantone 282		Braille transcrip.:		N/A										
Font size:				8,5 pt		Group:		N/A		RUT:		N/A			RD-Code:		N/A	
Add. Info:				N/A		Date:		15.09.2022		Weise								