

Инструкция по применению медицинского изделия

КВИКС®

Спрей назальный «КВИКС®» (QUIXX®) 30 мл

Нос можно назвать воротами и защитой дыхательных путей. Здоровый нос очищает вдыхаемый воздух от пыли, увлажняет и нагревает его до температуры тела, подготавливая к проникновению в легкие. Простуда, грипп и аллергии, сопровождаемые насморком, затрудняют выполнение данных функций. Медицинское изделие Спрей назальный «КВИКС®» (QUIXX®) 30 мл (далее «КВИКС®») снимает заложенность носа и помогает восстановить его нормальную работу, а также улучшает носовое дыхание.

1. ЧТО ТАКОЕ «КВИКС®» И КАК ОН ДЕЙСТВУЕТ

В 100 мл спрея «КВИКС®» содержится 84,6 мл воды Атлантического океана (Канкальская бухта, Франция) и 15,4 мл очищенной воды. Раствор прозрачный, без цвета и запаха.

«КВИКС®» представляет собой назальный спрей, содержащий воду Атлантического океана в оптимальной концентрации (содержание соли 2,6%). Эта вода обладает уникальной комбинацией целебных минералов и микроэлементов. Микроэлементы океанической воды, такие как медь, марганец, золото и серебро, ценятся за свои противомикробные, противовоспалительные и антиаллергические свойства.

«КВИКС®» оказывает естественную помощь заложенным носовым ходам и околоносовым пазухам, а также увлажняет слизистую оболочку носа, что особенно важно для поддержания здорового состояния дыхательной системы.

КАКИМ ОБРАЗОМ «КВИКС®» ОБЛЕГЧАЕТ НОСОВОЕ ДЫХАНИЕ?

- Эффективно уменьшает отек носовых ходов и снимает заложенность носа

- Активно очищает носовые полости и околоносовые пазухи
- Увлажняет слизистую оболочку носа

Благодаря своим свойствам «КВИКС®» восстанавливает функции носа, и тем самым снижает риск осложнений (ринит, синусит) и облегчает дыхание.

«КВИКС®» ОБЛАДАЕТ ТАКЖЕ СЛЕДУЮЩИМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ:

- Содержит только натуральные компоненты
- Безопасен при длительном использовании
- Не вызывает привыкания

2. КТО МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬ «КВИКС®»

Взрослые и дети от 3 месяцев. «КВИКС®» может применяться у беременных и кормящих женщин.

3. КАК ПРИМЕНЯТЬ «КВИКС®»

Всегда используйте «КВИКС®» в соответствии с данной инструкцией по применению. Если у вас возникли сомнения, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. В начале применения возможно возникновение чувства жжения.

Quixx®



V-No.:	V147841/01			TW-No.:	229810	BC-No.:	22-3117	Approved for printing:
Package:	N/A			Language:	Russian			
Size:	160 x 180 mm			Weight:	50 g/m ²			
Printing colours:	1. Pantone 282			Braille transcrip.:	N/A			
Font size:	8,5 pt	Group:	N/A	RUT:	N/A	RD-Code:	N/A	
Add. Info:	N/A			Date:	15.09.2022	Weise		

Дозировка:

Детям от 3 месяцев:

1-2 орошения носовых ходов 2-3 раза в день.

Взрослым:

1-3 орошения носовых ходов 2-3 раза в день.

Длительность применения не ограничена.

Пользование спреем:

Снимите колпачок. Подготовьте спрей к применению, несколько раз нажав на манжету накопника (рис. 1). Вставьте наконечник в носовой ход и нажмите на манжету (рис.2). Повторите процедуру с другим носовым ходом. Протрите наконечник салфеткой и наденьте колпачок.

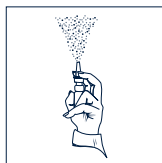


Рис. 1:



Рис. 2

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Гиперчувствительность (аллергические реакции) к морской воде.

5. КАК ХРАНИТЬ «КВИКС®»

Хранить при комнатной температуре. Срок годности 3 года. После вскрытия упаковки спрей «КВИКС®» следует использовать в течение 6 месяцев. Не используйте «КВИКС®» после окончания срока годности, указанного на упаковке. Хранить в недоступном для детей месте!

6. ОПИСАНИЕ УПАКОВКИ

Флакон спрея «КВИКС®» содержит 30 мл раствора. Флакон снабжен системой антибактериальной защиты, которая предотвращает загрязнение содержимого на протяжении всего периода использования, но не более 6 месяцев.

Каждый флакон содержит около 220 доз.

Регистрационное удостоверение

№ ФСЗ 2008/03304 от 23.05.2022

Производитель:

Лаборатуар Фармастер САС

П.З. де Краффт

67150 Эрстейн

Франция.



Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей:

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини", Россия, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д.10, БЦ «Башня на набережной», блок Б.

Тел.: (495) 785-01-00

Факс: (495) 785-01-01

Дата последней редакции 07/2021.

806 / V147841/01
NOT10113V05



Quixx®



**BERLIN-CHEMIE
MENARINI**

V-No.:	V147841/01			TW-No.:	229810	BC-No.:	22-3117	Approved for printing:
Package:	N/A			Language:	Russian			
Size:	160 x 180 mm			Weight:	50 g/m ²			
Printing colours:	1. Pantone 282			Braille transcrip.:	N/A			
Font size:	8,5 pt	Group:	N/A	RUT:	N/A	RD-Code:	N/A	
Add. Info:	N/A			Date:	15.09.2022	Weise		